


Изображение преполни-  
меризованных частиц  
наполнителя SphereTEC®,  
сделанное с помощью  
сканирующего электрон-  
ного микроскопа. Их фор-  
ма, а также распределе-  
ние в матрице композита  
создает эффект «шарики-  
подшипника», поэтому  
композит легко выдавли-  
вается, моделируется,  
не течет и хорошо  
адаптируется

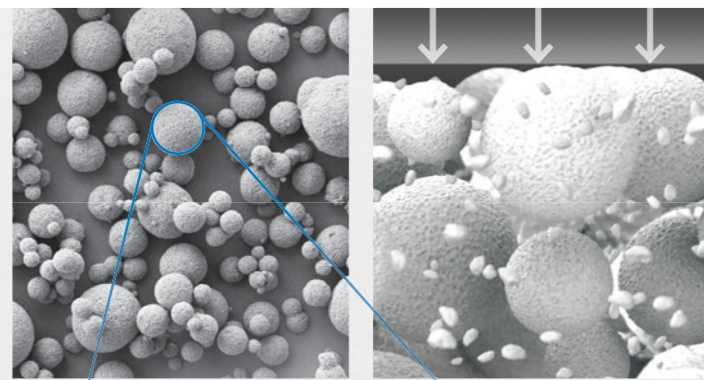

Микрогранулированная  
структура наполнителя  
SphereTEC® способна  
связывать больше свобод-  
ной смолы по сравнению  
с обычными наполнителя-  
ми. Поэтому композит  
Neo Spectra™ ST не при-  
липает к ручным инстру-  
ментам

## Универсальный композит Neo Spectra™ ST с технологией SphereTEC®

создан с учетом того,  
что важно для вас

Увеличенная частица наполнителя SphereTEC® диаметром 15 мкм

Эффективность композита Neo Spectra™ ST стала возможной благодаря технологии на-  
полнителя SphereTEC®, нашему запатентованному процессу создания микроразмерных,  
четко оформленных сферических супраструктур, состоящих из частиц субмикронного  
стекла. Морфология наполнителя SphereTEC®, гранулометрический состав и микрострук-  
тура поверхности обеспечивают преимущества, которые действительно важны для сто-  
матологов:



### УЛУЧШЕННЫЕ МАНИПУЛЯЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

для удобного внесения  
и легкого моделирования



### ЭФФЕКТ ХАМЕЛЕОНА

для простого  
подбора оттенка



### ДОКАЗАННАЯ СТОЙКОСТЬ

с хорошим блеском  
и стойкостью к окрашиванию  
для надежной эстетики

## Информация для заказа

### Neo Spectra™ ST

Универсальный композитный реставрационный материал

#### ВЫСОКАЯ ВЯЗКОСТЬ (HV – high viscosity)

**Стартовый набор компюл Neo Spectra™ ST Intro Kit (HV)** 60701970  
24 компюлы HV (серого цвета) по 0,25 г (4×A1, 4×A2, 8×A3, 4×A3.5, 4×A4), пистолет для компюл, наклейка для шкалы оттенков, 1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл), принадлежности

**Стартовый набор шприцев Neo Spectra™ ST Intro Kit (HV)** 60701980  
5 шприцев HV (серый поршень) по 3 г (A1, A2, A3, A3.5, A4), наклейка для шкалы оттенков, 1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл), принадлежности

**Эконабор шприцев Neo Spectra™ ST Eco Kit (HV)** 60701990  
6 шприцев HV (серый поршень) по 3 г (3×A2, 3×A3), наклейка для шкалы оттенков, 1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл), принадлежности

Рефиллы	Компюлы (16×0,25 г)	Шприцы (1×3 г)
<b>Neo Spectra™ ST (HV)</b>		
A1 (оттенки VITA® A1, B1, C1)	60701971	60701981
A2 (оттенки VITA® A2, B2, D2)	60701972	60701982
A3 (оттенки VITA® A3, C2, D3, D4)	60701973	60701983
A3.5 (оттенки VITA® A3.5, B3, B4, C3)	60701975	60701985
A4 (оттенки VITA® A4, C4)	60701974	60701984
BW (отбеленный белый)	60701976	

#### НИЗКАЯ ВЯЗКОСТЬ (LV – low viscosity)

**Стартовый набор компюл Neo Spectra™ ST Intro Kit (LV)** 60701870  
24 компюлы LV (синего цвета) по 0,25 г (4×A1, 4×A2, 8×A3, 4×A3.5, 4×A4), пистолет для компюл, наклейка для шкалы оттенков, 1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл), принадлежности

**Стартовый набор шприцев Neo Spectra™ ST Intro Kit (LV)** 60701880  
5 шприцев LV (синий поршень) по 3 г (A1, A2, A3, A3.5, A4), наклейка для шкалы оттенков, 1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл), принадлежности

**Эко-набор шприцев Neo Spectra™ ST Eco Kit (LV)** 60701890  
6 шприцев LV (синий поршень) по 3 г (3×A2, 3×A3), наклейка для шкалы оттенков, 1 флакон адгезива Prime&Bond Universal™ (2,5 мл), принадлежности

Рефиллы	Компюлы (16×0,25 г)	Шприцы (1×3 г)
<b>Neo Spectra™ ST (LV)</b>		
A1 (оттенки VITA® A1, B1, C1)	60701871	60701881
A2 (оттенки VITA® A2, B2, D2)	60701872	60701882
A3 (оттенки VITA® A3, C2, D3, D4)	60701873	60701883
A3.5 (оттенки VITA® A3.5, B3, B4, C3)	60701875	60701885
A4 (оттенки VITA® A4, C4)	60701874	60701884
BW (отбеленный белый)	60701876	

#### ООО «Дентсплай Сирона»

115432, Россия, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,  
«Немецкий центр промышленности и торговли», офис 9-01

Телефон +7 (495) 725-10-87  
Факс +7 (495) 725-10-86

www.dentsplysirona.com

THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY™

Dentsply  
Sirona

### Neo Spectra™ ST Effects\*

Универсальный композитный реставрационный материал

**Стартовый набор компюл Neo Spectra™ ST Effects** 60701940  
24 компюлы HV (серого цвета) по 0,25 г (12×D1, 8×D3, 4×E1), иллюстрированное техническое руководство, наклейка для шкалы оттенков

**Стартовый набор шприцев Neo Spectra™ ST Effects** 60701950  
3 шприца HV (серый поршень) по 3 г (1×D1, 1×D3, 1×E1), иллюстрированное техническое руководство, наклейка для шкалы оттенков

Рефиллы	Компюлы (16×0,25 г)	Шприцы (1×3 г)
<b>Neo Spectra™ ST Effects (HV)</b>		
D1 (используется с A1, A2)	60701942	60701952
D3 (используется с A3, A3.5, A4)	60701943	60701953
E1 (используется с A1, A2, A3, A3.5, A4)	60701941	60701951

\* Только высокая вязкость (HV – high viscosity).

Принадлежности		
Пистолет для компюл		60665900

с технологией  
сферического  
наполнителя  
SphereTEC®

В NEO SPECTRA™ ST  
СОБРАНО ИМЕННО  
ТО, ЧТО ВАМ НУЖНО

Увеличенная частица наполнителя SphereTEC® диаметром 15 мкм

## Neo Spectra™ ST

Универсальный композитный  
реставрационный материал

THE DENTAL  
SOLUTIONS  
COMPANY™

Dentsply  
Sirona

Композит Neo Spectra™ ST создан не только с использованием технологии наполнителя SphereTEC®, в нем собрано многое из того, что важно для вас

## Neo Spectra™ ST

Универсальный композитный реставрационный материал

Когда мы создавали композит Neo Spectra™ ST, мы спросили стоматологов, что для них важнее всего в композите? Безусловно, он должен быть прочным. А что если улучшить его манипуляционные свойства, что позволит сэкономить время при реставрации и сделать работу с композитом более комфортной? Или, например, упростить подбор оттенка, что повысило бы эффективность процедуры и свело бы к минимуму запасы? Важно ли будет пациентам то, что композит будет устойчив к окрашиванию? Представляем композит Neo Spectra™ ST, который создан с учетом ваших пожеланий.

74% стоматологов недовольны манипуляционными характеристиками композитных материалов – адаптируемостью и липкостью!

При реставрации по II классу до 28% рабочего времени стоматологи тратят на подбор оттенка, финишную обработку и полировку?

5 универсальных оттенков CLOUD shade композита Neo Spectra™ ST

Оттенки VITA\*

A1			A2			A3			A3.5			A4		BW (отбеленный белый)	
A1	B1	C1	A2	B2	D2	A3	C2	D3	D4	A3.5	B3	B4	C3	A4	C4

## эффективность имеет значение

### Характеристики, которые упрощают работу

Благодаря технологии наполнителя SphereTEC® композитный материал Neo Spectra™ ST обладает улучшенными манипуляционными свойствами и предлагает 2 варианта вязкости: **низкую (LV – low viscosity)** и **высокую (HV – high viscosity)** вязкость, что позволяет ему соответствовать вашим предпочтениям и технике нанесения для эффективного и простого использования.

- Не прилипает к инструменту.
- Легко адаптируется к поверхностям полости при реставрации.
- Легко моделируется и принимает нужную форму.
- Устойчив к стеканию.




## эстетика имеет значение

### Отличная эстетика, создание которой стало еще проще

Уникальная структура наполнителя SphereTEC® обеспечивает композиту Neo Spectra™ ST отличный эффект хамелеона для простого подбора оттенков. Она же гарантирует более быструю финишную обработку и полировку до превосходного блеска.

- Пять оттенков CLOUD shade перекрывают всю шкалу оттенков VITA\*\*3.
- Минимум оттенков экономит расходы и сокращает необходимые запасы композитов в клинике.
- Системы для финишной обработки и полировки Enhance® и Enhance® PoGo® помогают добиться полировки до блеска.

Для сложных случаев во фронтальном участке дополнительно используются оттенки дентина и эмали композита Neo Spectra™ ST Effects вместе с универсальными оттенками композита Neo Spectra™ ST в технике упрощенного послойного нанесения.

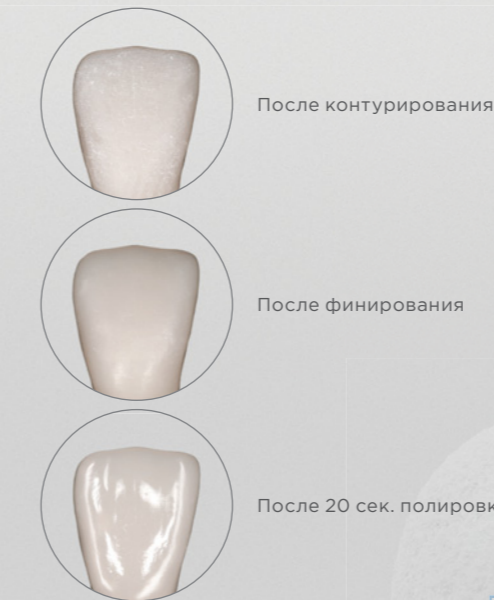

После контурирования

После финирирования

После 20 сек. полировки

## долговечность имеет значение

### Стойкий эстетический результат

Наполнитель SphereTEC® обеспечивает продолжительную стойкость результатов. Это демонстрируют более чем 24 миллиона реставраций по всему миру, выполненных композитом Neo Spectra™ ST, что доказывает его клинический успех.

- Превосходная устойчивость к окрашиванию.
- Доказанная стойкость к истиранию.

57% стоматологов отмечают наличие окрашивания на поверхности реставрации при повторном осмотре<sup>2</sup>

80% пациентов видят различия между зубами с пломбами и без них<sup>4</sup>



После 24-часового теста на окрашивание<sup>1</sup>

В композите Neo Spectra™ ST с технологией наполнителя SphereTEC® собрано все то, что важно для вас

1. Опрос пользователей композитных материалов в Европе (n=297). Dentsply Sirona Restorative, 2015 г.  
2. Опрос Class II Composite Insights, Greater New York Dental Show, 2016 г.  
3. VITA не является зарегистрированной торговой маркой Dentsply Sirona.  
4. Joiner, 2004 г. 5. Данные по запросу.