

Neo Spectra™ ST Effects

Универсальный реставрационный композитный материал

Новый уровень. Просто. Эстетично

В эстетически сложных реставрациях передних зубов композит Neo Spectra™ ST Effects дополняет базовый композит Neo Spectra™ ST в технике упрощенного послойного нанесения.

- Когда требуется меньшая прозрачность, опаковые оттенки дентина D1 и D3 композита Neo Spectra™ ST Effects сочетаются с **универсальными оттенками CLOUD shade A1-A4** композита Neo Spectra™ ST.
- **Эмалевый оттенок E1** композита Neo Spectra™ ST Effects при необходимости помогает создать эффект прозрачного режущего края.
- Сферический наполнитель, входящий в состав композитов Neo Spectra™ ST и Neo Spectra™ ST Effects, позволяет использовать их в технике упрощенного послойного нанесения.

Факты


1 из 3

опрошенных отметили, что первое, на что они обращают внимание на лицах других, – это зубы².

более 1/3


практикующих стоматологов считают подбор цвета и общий эстетический результат наиболее сложным аспектом композитной реставрации передних зубов³.

Техника упрощенного послойного нанесения композитов Neo Spectra™ ST

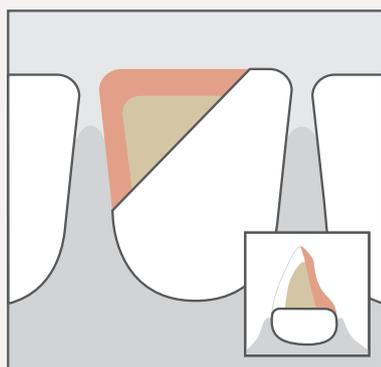


Опаковые оттенки и универсальные оттенки CLOUD shade

Небная стенка и аппроксимальные поверхности восстанавливаются одним из универсальных оттенков CLOUD shade композита Neo Spectra™ ST. Дентинное ядро восстанавливается опакующими оттенками Neo Spectra™ ST Effects

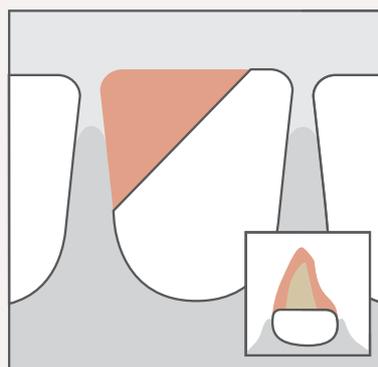

Универсальные оттенки CLOUD shade

Вестибулярная поверхность полностью восстанавливается одним из универсальных оттенков CLOUD shade базового композита Neo Spectra™ ST

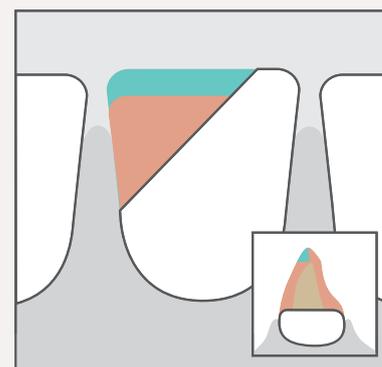

Прозрачный оттенок эмали (опционально)

Для создания эффекта большей прозрачности на вестибулярной поверхности в области режущего края используется эмалевый оттенок композита Neo Spectra™ ST Effects

A2 Один из пяти универсальных оттенков CLOUD shade базового композита Neo Spectra™ ST¹

D1 Один из двух оттенков дентина композита Neo Spectra™ ST Effects для дополнительной опаковости

¹ Универсальные оттенки CLOUD shade композита Neo Spectra™ ST перекрывают всю шкалу оттенков VITA® (не является зарегистрированной торговой маркой Dentsply Sirona).

² <http://www.melbourneorthodontics.com/educational/study-7-ways-smiles-affect-first-impressions/>,
³ The Key Group, Inc., 2018.

Neo Spectra™ ST Effects

Универсальный реставрационный композитный материал

Оптимизируйте запасы композитов с помощью сочетания
композитов Neo Spectra™ ST + Neo Spectra™ ST Effects
в технике упрощенного послойного нанесения



Информация для заказа

Neo Spectra™ ST Effects выпускается только в высокой вязкости HV (high viscosity).

Стартовый набор компьют Neo Spectra™ ST Effects

607.01.940

24 компьюлы HV (высокой вязкости) по 0,25 г (12×D1, 8×D3, 4×E1), иллюстрированное техническое руководство, наклейка для шкалы оттенков



Стартовый набор шприцев Neo Spectra™ ST Effects

607.01.950

3 шприца HV (высокой вязкости) по 3 г (1×D1, 1×D3, 1×E1), иллюстрированное техническое руководство, наклейка для шкалы оттенков



Рефиллы HV (высокой вязкости) Neo Spectra™ ST Effects

Компьюлы

D1 (используйте с A1 и A2)
D3 (используйте с A3, A3.5 и A4)
E1 (используйте с A1, A2, A3, A3.5 и A4)

16×0,25 г
607.01.942
607.01.943
607.01.941



Шприцы

1×3 г
607.01.952
607.01.953
607.01.951



ООО «Дентсплай Сирона»

115432, Россия, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
«Немецкий центр промышленности и торговли», офис 9-01

Телефон +7 (495) 725-10-87

Факс +7 (495) 725-10-86

www.dentsplysirona.com