

# Q ETCH UF.™

**Q-Etch UF Etching Gel / Кью Этч ЮЭф Этчинг Гель. РУ №ФСЗ 2011/10681 от 20 /09/2011г.  
Материал стоматологический адгезивный, вспомогательный.  
Гель для травления.**

## **Применение:**

Гель на основе фосфорной кислоты предназначен для протравливания дентина и эмали, подготовки поверхности для наложения композитов с применением адгезивных систем.

## **Инструкция по применению:**

Q-Etch UF наносится в контролируемом количестве на поверхности зубной эмали и дентина. Рекомендуемое эффективное время протравливания:

- Эмаль – 30 - 60 секунд
- Дентин – как указано в инструкции производителей адгезивных систем. Протравливающий гель должен быть смыт обильным количеством воды не менее 20 секунд.

Эмаль высушивать до появления на поверхности характерного белого замороженного узора.

Дентин – согласно инструкции производителя адгезивных систем.

## **Свойства:**

- Гель остается в месте нанесения, не растекается.
- Отлично растворяется в воде и легко смывается.
- Прост в использовании. Аппликационные насадки предварительно изогнуты для обеспечения простого и точного нанесения геля, даже в случаях дистально и орально расположенной полости.
- Цвет геля облегчает его визуализацию.
- Одноразовые насадки экономят время и более гигиеничны.

## **Содержимое упаковки:**

Q-Etch UF – 4 шприца по 1,2 мл. и 8 аппликационных насадок.

## **Состав:**

Фосфорная кислота 37%, стабилизатор 2,99%, пигмент 0,01%, частицы кварца 10%, вода 50%.

## **Меры предосторожности:**

Q-Etch UF содержит фосфорную кислоту. Избегайте контакта с кожей и глазами. В случае контакта – промыть обильным количеством воды.

Продукт должен использоваться в соответствии с настоящей инструкцией. Производитель не несет ответственности за вред, принесенный в результате неправильного использования или обращения.

## **Условие хранения:**

Хранить при температуре от +10°C до +24°C.

## **Срок годности:**

2 года с даты изготовления.

## **Дистрибьютор в России:**

ООО «Медента»  
Россия, 123308, Москва,  
Новохорошевский проезд, д. 25.  
Контактная информация:  
Тел. горячей линии +7-499-946-4609.  
shop@medenta.ru | www.medenta.ru

