

Материал стоматологический пломбировочный композитный
Дентин текучий Flow Plus Light Cure Composite
Соответствует ISO 4049
Инструкция по применению.

Описание.

Материал стоматологический пломбировочный композитный Дентин текучий Flow Plus Light Cure Composite (далее по тексту Flow Plus) текучий светоотверждаемый реставрационный материал, подходящий для реставрации классов III, IV и V.

Химический состав вместе со стекляннным наполнителем (60%) дает текучий, не оседающий, реставрационный материал.

Сочетание текучести Flow Plus и системы прямого нанесения упрощает размещение материала и сводит к минимуму финишную обработку, что приводит к неизменному превосходному результату.

Показания к применению.

1. Минимально инвазивное установка реставрации в полости.
2. Замещение дефектов передних зубов типа III, IV и V класса с пришеечным кариесом, клиновидными дефектами зубов.
3. Замещение дефектов жевательных зубов, таких как класс I и класс II, без окклюзионного давления.
4. Замещение дефектов молочных зубов
5. Замещение дефектов развития зубов, например, гипоплазия эмали.
6. Профилактическое пломбирование (пломбирование ямок и фиссур).
7. Основа/накладка под пломбу
8. Замещение дефектов базового винира
9. Пустотообразующие поддурения
10. Дополнительная обработка или краевое прилегание пломбы и обработка контура после установки реставрации композитом.
11. Корректировка оттенка на поверхности композитной реставрации и обесцвеченных зубов.
12. Прямые композитные ламинат-виниры.
13. Цементирование ламинат- виниров.

Противопоказания.

В случае известной аллергии на некоторые компоненты запрещается использовать.

Возможные побочные действия.

Аллергическая реакция на компоненты материала.

Меры предосторожности.

1. Не применять на пациентах или клиентах, у которых имеется аллергия на данный тип материала.
2. Если при эксплуатации данного продукта у пациента возникает сыпь или воспаление кожи, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
3. Избегайте контакта с мягкими тканями, кожей или глазами. В случае контакта немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.
4. Если полость глубокая, защитите ее при помощи защитной прокладки на обнаженную пульпу зуба. (Примечание: Не используйте прокладку, содержащую эвгенол).
5. Надеть УФ-защитные очки при светоотверждении.
6. Данный продукт был разработан для использования в стоматологии и предназначен только для профессиональных стоматологов.

Применение.

1. После очистки поверхности зуба, проверьте оттенок, пока зуб еще влажный.
2. Изолировать и высушить.
3. Протравить эмаль и/или дентин в течение 15 секунд с помощью герметика (самопротравливающий герметик, зарегистрированный на территории РФ, используемый в клинике в соответствии с указаниями производителя). Тщательно промыть и просушить воздухом.
4. Нанести бондинг (зарегистрированный на территории РФ, используемый в клинике в соответствии с указаниями производителя).
5. Выбрать подходящий оттенок. Нанести слой Flow Plus напрямую на препарирование вдоль аксиального и десневого краев. Используйте кисть, чтобы позволить материалу стечь в краевые границы и углубления препарирования.
6. Дополнительные слои должны быть не более 2 мм. светоотверждение каждого увеличивайте минимум на 40

секунд с помощью устройств для отверждения видимым светом.

7. Придайте контурам и выступам желаемую форму, растекая композит в препарат движениями кисти.

8. Обработайте и отполируйте обычным методом.

9. Для получения глазурованного покрытия нанесите одну или две капли Flow Plus, нанесите кистью и полимеризуйте в течение 40 секунд.

10. Для глубоких полостей рекомендуется послойное наложение материала. Выберите время фотополимеризации в приведенной ниже таблице 2.

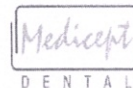


Таблица 2

Оттенок	A2, A3T	A1, A3	A3,5, B2
Клиническая глубина полимеризации	3,0	2,5	2,0

(Вышеуказанные значения измерены в мм в течение 30 секунд, полимеризация галогенной лампой)

После отверждения удалите излишки материала абразивными камнями и штифтами, а затем отполируйте.

Примечание для шприцев Flow Plus.

Отвинтите крышку, наденьте насадку с универсальной дозировкой на шприц. Композит является жидкотекучим и, когда вы нажимаете поршень, давление заставляет материал выходить наружу. Чтобы остановить поток, достаточно втянуть обратно поршень на 1 мм. Осторожно: избегайте чрезмерно тянуть поршень, иначе воздух попадает в шприц и пузырьки воздуха окажутся в следующей порции материала. Достаточно чуть-чуть потянуть в обратном направлении, поршень плавно вернется в исходное положение, без образования пузырьков воздуха. Во избежание выхода лишнего материала предлагаем держать насадку шприца, направив ее прямо вверх, до следующего применения у этого же пациента. Также предлагаем начинать толкать поршень в этом положении, таким образом, оставшийся в шприце воздух выйдет наружу и пузырьки в материале не образуются. По окончании реставрации удалите насадку с универсальной дозой, наденьте на шприц крышку и завинтите ее.

Условия хранения.

Беречь от прямых солнечных лучей.

При температуре от +1 до +30°C

Относительная влажность от 30 до 75%

Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа

КОД СЕРИИ:




Код серии сообщает дату срока изготовления в формате месяц, год, день с числовым суффиксом для однозначной идентификации серии материала. Необходимо указывать настоящий номер серии во всей корреспонденции.



Дата истечения срока годности отображается в формате год, месяц. Запрещается использовать продукт после этой даты.

Диапазон оттенков: (соответствуют керамике VITA Lumin® и Vintage Halo®):

A1, A2, A3, A3,5, B2.

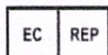

Stephen Rows
8 LA Alpispa Calle Tingufaya 40,
Chayofa Ariza 38552,
Santa Cruz De Tenerife, Spain...



Medicapt UK Ltd. (Медисепт ЮКей Лтд.), 2nd Floor, Hygeia House, 66 College Road, Harrow, Middlesex, HA1 1BE, United Kingdom (2-й этаж, Хигея Хаус, 66 Колледж Роад, Харроу, Мидлсекс, HA1 1BE, Соединенное Королевство).

Тел. офиса: +44 (0) 1923 251327/Факс: +44 (0) 1923 251327

Компания Medicapt UK Ltd соблюдает политику постоянного мониторинга и улучшения нашей продукции. Если у вас есть какие-либо отзывы о данном продукте, свяжитесь с нами по указанному выше адресу, сообщив номер серии, указанный на упаковке.

Уполномоченный представитель производителя медицинского изделия:

Общество с ограниченной ответственностью «Зубная Архитектура»

(ООО «Зубная Архитектура»), Россия.

195027, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Большая Охта, пр-кт Шаумяна, д. 4, к. 1, Литер А, пом. 5Н, 25Н, офис 2.

Тел.: +7 (812) 449-90-01, +7 (812) 677-90-01

Адрес электронной почты: zubrus@zubrus.ru