

PORCELAIN SILANE™

Porcelain Silane / Порцилан Силан
РУ №ФСЗ 2011/10681 от 20.09.2011г.

Материал стоматологический адгезивный, вспомогательный.

Силан для керамики.

Применение:

Материал Porcelain Silane предназначен для улучшения адгезии при подготовке фарфоровых дентальных изделий (вставок, коронок, зубов и пр.) к установке, а также при восстановлении и ремонте поврежденных керамических или металлокерамических конструкций.

Свойства:

- Porcelain Etch специальная кислота для травления фарфора. Придает микроскопическую шероховатость поверхности, обеспечивает прочное механическое сцепление с композитами и адгезивами.
- Porcelain Silane - отдельный компонент для обработки поверхности, усиливает сцепление и надежность адгезии к протравленному фарфору.

Содержимое упаковки:

- Porcelian Silane флакон 2 мл. - 2 шт.;
- Пустой шприц 1,2 мл. - 2 шт.;
- Наконечник с микроапликатором - 4шт.

Состав:

Porcelain Silane™: этанол 97%, глицидоксипропилтриметоксисилан 3%.

Условие хранения:

Хранить при температуре не выше +24°C.

Срок годности:

2 года с даты изготовления.

Дистрибьютор в России:

ООО «Медента»

Россия, 123308, Москва,
Новохорошевский проезд, д. 25.

Контактная информация:

Тел. горячей линии +7-499-946-4609.

shop@medenta.ru | www.medenta.ru



PORCELAIN SILANE™

Porcelain Silane / Порцилан Силан
РУ №ФСЗ 2011/10681 от 20.09.2011г.

Материал стоматологический адгезивный, вспомогательный.

Силан для керамики.

Инструкция по применению:

Подготовка керамической поверхности к приклейке

1. В случае использования во рту пациента, изолируйте протравливаемую поверхность.
2. Подготовка отдельной керамической коронки: перед травлением, бором средней твердости, удалите глазурированное покрытие с приклеиваемой поверхности, чтобы нанести достаточный для прочности и эластичности слой адгезива или композита. Смойте остатки с керамической поверхности и высушите влагу воздухом.
3. Микрокисточкой нанесите Porcelain Etch на поверхность керамики и оставьте на 60 секунд.
4. Тщательно прополощите водой керамику для удаления кислоты и высушите. Протравленная керамика должна иметь белый «замороженный» узор. В противном случае - повторите процедуру травления.
5. Нанесите кисточкой Porcelain Silane на протравленную поверхность и тщательно высушите потоком воздуха.

Примечание: процедуры реставрации и ремонта керамики указаны в иллюстрированных инструкциях для High-Q-Bond Adhesive Reisin Cement.

Меры предосторожности:

Будьте осторожны и осмотрительны при применении, остерегайтесь контакта со слизистой оболочкой рта, кожей и глазами. При случайном контакте, обильно смойте водой и, в случае необходимости, окажите необходимую медицинскую помощь. В случае применения во рту пациента, рекомендуется изолировать обрабатываемую поверхность.

Продукт должен использоваться в соответствии с настоящей инструкцией. Производитель не несет ответственности за вред, принесенный в результате неправильного использования или обращения.

Дистрибьютор в России:

ООО «Медента»

Россия, 123308, Москва,

Новохорошевский проезд, д. 25.

Контактная информация:

Тел. горячей линии +7-499-946-4609.

shop@medenta.ru | www.medenta.ru

